


Objaśnienie symboli

Symbol Wskazanie

 Urządzenie niniejsze spełnia wymagania Rozporządzenia o wyrobach medycznych (2017/745/EU).

 Producent

 Przestrzegać instrukcji użytkowania


 Data ważności







 Numer seryjny

 Wyrób Medyczny

 UDI (niepowtarzalny identyfikator wyrobu)

 Importer

 Wskazuje, że materiałem opakowaniowym jest tektura inna niż falista (karton)

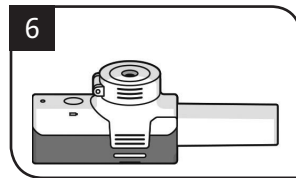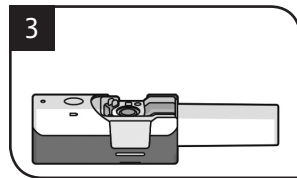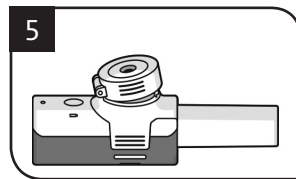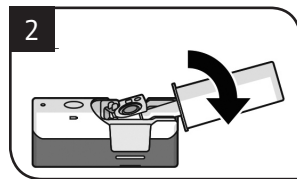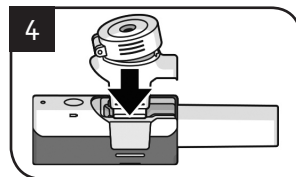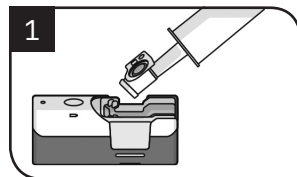

90360005

Breelib™



Opakowanie miesięczne Instrukcja użycia



Vectura Group Ltd
One Prospect West, Chippenham, Wiltshire, SN14 6FH,
Wielka Brytania,
www.vectura.com



Vectura Ireland Limited
Block 2, Newtown Business and Enterprise Centre
Newtownmountkennedy
Co. Wicklow, A63 XV26
Irlandia



 0123



DAW-10006-02
510006R2
270923

1. Informacje o bezpieczeństwie

Zagrożenie

- ▶ Opakowanie miesięczne Breelib™ jest wyposażeniem dodatkowym systemu inhalacyjnego Breelib™. Przed użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcję użycia systemu inhalacyjnego Breelib™. Prawidłowa i bezpieczna obsługa jest możliwa wyłącznie w przypadku przestrzegania instrukcji użycia systemu inhalacyjnego Breelib™.

- ▶ Nie używać systemu Breelib™, jeśli jest uszkodzony lub dokonano jego modyfikacji. Należy stosować wyłącznie wyposażenie dodatkowe dostarczone przez autoryzowanego partnera serwisowego.
- ▶ Naprawy systemu Breelib™ mogą być wykonywane wyłącznie przez firmę Vectura Group Ltd lub partnera serwisowego upoważnionego przez Vectura Group Ltd. Firma Vectura Group Ltd nie ponosi

- odpowiedzialności za uszkodzenia ani za nieprawidłowe działanie wynikające z nieautoryzowanej naprawy.
- ▶ Nie należy dzielić się systemem Breelib™ z innymi osobami, ponieważ może to prowadzić do zakażeń. System Breelib™ jest przeznaczony do stosowania tylko przez jednego pacjenta.
- ▶ Przed użyciem należy upewnić się, że system Breelib™ został właściwie oczyszczony zgodnie z instrukcją użycia systemu inhalacyjnego Breelib™.

Ostrzeżenie

- ▶ Nie używać komponentów opakowania miesięcznego przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, aby zachować stałą wydajność.

2. Zawartość opakowania

- ▶ Instrukcja użycia (niniejszy dokument)
- ▶ Ustnik
- ▶ Nebulizator

3. Przeznaczenie

Opakowanie miesięczne Breelib™ jest wyposażeniem dodatkowym

systemu inhalacyjnego Breelib™. Opakowanie miesięczne Breelib™ można stosować wyłącznie w połączeniu z systemem inhalacyjnym Breelib™. Informacje odnośnie przeznaczenia, ogólne instrukcje i opis urządzenia można znaleźć w instrukcji użycia systemu inhalacyjnego Breelib™.

4. Przechowywanie i transport

Dla opakowania miesięcznego Breelib™ brak jest określonych specjalnych warunków przechowywania oraz transportu.

5. Okres użytkowania

Komponenty opakowania miesięcznego Breelib™ są przeznaczone do wielokrotnego użycia. Okres użytkowania opakowania miesięcznego Breelib™ jest ograniczony do jednego miesiąca.

6. Usuwanie

Komponenty opakowania miesięcznego można usuwać razem z normalnymi odpadami domowymi.

Bayer
90360005